

ブラインドの手技を プレスキャンでイメージング



Hit the Spot

*Improve the safety, speed, and efficiency
of epidural and spinal anesthesia.*

- 硬膜外・脊椎麻酔に特化した超音波装置
- 穿刺位置と深度目安の表示
- コンパクトで持ち運びが容易

Accuroは持ち運び可能なポケットサイズの超音波装置です。
プローブ、画面、バッテリーが一体となっておりボタンを押すだけで素早く起動し、
使用準備に手間が掛かりません。

AccuroにはSPINE・BONE・TISSUEの3つのモードが準備されています。

■ SPINEモード

硬膜外・脊椎麻酔に特化したアプリケーションで穿刺位置と深度の目安を表示します。

■ BONEモード

独自技術によって、骨表面を高い輝度で描出した画像を提供します。

■ TISSUEモード

通常Bモードの超音波画像を提供します。



Accuroは骨形状から脊椎のどの位置に超音波が向かっているかを自動的に判別をし、至適位置では**オレンジ色で椎体モデルと穿刺深度目安**を表示します。



SPINE モード参考画面

- 椎間関節までの距離をオレンジ色で表示
- 画面下部の 3DNAVIGATION SPINE がサポート



小型装置なので助手の手を必要とせず
麻酔処置者1人での取扱いが可能です。



専用プローブカバー（別売：品番4741）を
用いる事で清潔領域での使用も可能です。